

> Multicare Glukose 25 stk. målestrimler incl lancetter

## Multicare Glukose 25 stk. målestrimler incl lancetter



Varenr : 3809125

Producent : MediGroup

Disse stix virker kun sammen med Multicare kolesterolmåler. Opbevares tørt ved stuetemperatur eller i køleskab. Må ikke fryses. Kan ikke anvendes efter udløbsdato. Sådan tager du en test: 1. Sæt memo chippen i Multicare 2. Placer en test strip i Multicare. Strippen skal så langt ind den kan komme 3. Vask hænderne omhyggeligt 4. Brug en "prikker" til at prikke hul på en af fingerspidserne. Det er en god ide at prikke hullet på siden af fingerspidsen 5. Dryp en dråbe blod på midten af den synlige strip 6. Mindre end 1 minut efter fremkommer resultatet på LCD skærmen. 7. Fjern og smid strippen ud

Indeholder: 25 stk stix, 25 stk blodprøve "prikker", 1 memo chip calibreret til disse strips

**Pris : 330,00 DKK inkl moms (264,00 DKK ekskl moms)**